

Gymna ShockMaster

Mehr als nur Stoßwellentherapie



gymna[®]

gymna.com

Gymna ShockMaster

Maximales Resultat bei minimalem Zeitaufwand

Radiale Stoßwellentherapie

Die ideale Behandlungsmethode bei allen chronischen und komplexen muskuloskelettalen Erkrankungen.

Funktionsprinzip


Ein schnell bewegendes Projektil überträgt seine Energie an den Behandlungskopf. Auf diese Weise werden radiale Stoßwellen erzeugt, die im Körper divergieren und vom behandelten Körperbereich aufgenommen werden.

Resultat

- Schmerzlinderung
- Regeneration des geschädigten Gewebes
- Abbau von Fibrose und Kalzinose

Mehrwert für Ihre Praxis

- Durchschnittlich 6 bis 8 Behandlungssitzungen
- Eine realistische Alternative zur Chirurgie

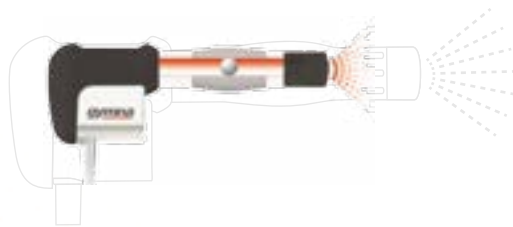

Gymna ShockMaster

Wichtigste Indikationen

Gymna ShockMaster – effizient in der Behandlung von:



Chronischen Tendinopathien und Enthesiopathien: Epicondylitis, Plantar Fasciitis, Tendopathie der Rotatorenkette (mit oder ohne Kalzifikationen), usw.



Sportindikationen: proximale Kniesehnen-Tendinopathie, Adduktoren-Tendopathie, Peronealtendinopathie, Mediales Tibiakantensyndrom, „Springerknie“, Osgood-Schlatter, usw.



Myofasziales Schmerzsyndrom: Schmerzen im unteren Rückenbereich, Nackenschmerzen, Triggerpunkte, Spannungskopfschmerzen, usw.



Muskelerkrankungen: Muskelkater, Hypertonie, Spasmen, Krämpfe, Muskelverhärtung, Fibrose, usw.

Sowie ferner: Dupuytren-Kontraktur, Morbus Ledderhose, Akupunkturpunkte, Metatarsalgie, usw.

Gymna ShockMaster 500

Behandlung unter bestmöglichen Voraussetzungen


Die ideale Unterstützung in Ihrer Praxis mit einer Schnittstelle, die einen Schritt weitergeht

Benutzerfreundlich

- Schneller und einfacher Wechsel zwischen Handstücken durch 2 Anschlüsse
- Leiser und vibrationsfreier Ölkompressor, der dank der „Push to Open“ Tür schnell und einfach zugänglich ist
- Soft Closing Schublade mit Stoßdämpfern
- Schnelle Software-Updates über den USB-Port



Dank der großen Räder schnell und einfach transportabel

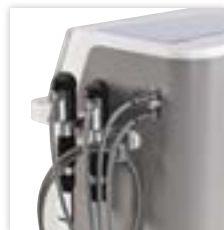

Praktisches Kabelaufhängungssystem für Ihre Handstücke



Geordnetes Zubehör durch vorgeformte Schubladeneinteilung

Bleiben Sie mit der Benutzerschnittstelle auf dem Laufenden

Die Stoßwellentherapie entwickelt sich noch stets weiter. Durch ständige Aktualisierung der Behandlungssoftware mit den neuesten Erkenntnissen bleiben Sie auf dem Laufenden:

- Die Behandlungsparameter werden anhand der jüngsten Erkenntnisse angepasst
- Es werden stets neue Erkrankungen mit den dazugehörigen Behandlungsprotokollen hinzugefügt.

Darüber hinaus erhalten Sie:

- Realistische Behandlungsfotos zur Unterstützung
- Anatomiebibliothek
- Medizinische Informationen über die mit Stoßwellentherapie zu behandelnden Erkrankungen

Und dies alles möglichst intuitiv und effizient.



Aktualisierte Liste der Indikationen auf der Grundlage therapeutischen Fachwissens und evidenzbasierter Resultate



Datenbank der Patienten mit Behandlungsverlauf auf der Grundlage des VAS



Visuelle Darstellung der Behandlungszone mit eventueller Schmerzausstrahlung bei der Behandlung von Triggerpunkten

Gymna ShockMaster 300

Stoßwellentherapie, jederzeit und überall

Mobilität dank des kompakten Formats

Mobil

- Klein und leicht
- Dank der praktischen Tragetasche einfach zu transportieren
- Geräuschloser, wartungsfreier Einbaukompressor

Einfach

- Plug & Play
- Große Bedienungsknöpfe
- Deutliche Wiedergabe der Behandlungsdauer dank des farbigen Lichtbalkens



Behandlung direkt aus der Tragetasche möglich



Gymna ShockMaster

An Patient und Pathologie angepasste Stoßwellenbehandlung

1

Behandlung der Sehnenkrankung mit dem richtigen Behandlungskopf



2

D-Actor-Behandlung für:

- Verringerung der Muskelspannung
- Förderung der Blutzirkulation
- Behandlung möglicher Triggerpunkte










3

V-Actor

- Abfuhr von Stoffwechselabfallstoffen und Toxinen
- Muskelentspannung
- Verbesserung der Mikrozirkulation



15 mm Applikator		Tendinopathien und Kalzinose bis zu 40 mm Tiefe
15 mm Fokuslinsen-Applikator		Oberflächliche Schmerzzonen, Gesichtsmuskeln, Nacken, Kopf
6 mm Akupunkturapplikator		Aktivierung der Akupunkturpunkte
15 mm 'Deep Impact' Applikator		Tendinopathien und Kalzinose bis zu 60 mm Tiefe
20 mm D-ACTOR I		Myofasziale Schmerztherapie, Fibrose, Erkrankungen von Muskeln und darunter liegendem Gewebe, tiefer liegende Muskeln (m. piriformis, m. gluteus minimus)
35 mm D-ACTOR II		Myofasziale Schmerztherapie, Fibrose, Erkrankungen von Muskeln und darunter liegendem Gewebe, Rückenmuskeln, Hautelastizität, tiefer liegende Muskeln (m. piriformis, m. gluteus minimus)
V-ACTOR		Myofasziale Therapie, verzögert auftretende Muskelschmerzen (Muskelkater, DOMS), Muskelbehandlung vor und nach der Belastung



Einfache und schnelle Wartung

Gymna ShockMaster

Die beste Unterstützung und Erweiterung für Ihre Praxis

Gymna ShockMaster bedeutet Unterstützung, Fachwissen und Benutzerfreundlichkeit.
Diese Geräte bieten dem Therapeuten:



Erkenntnisse und Fachwissen

- Gerät auf dem neuesten Stand mit der aktuellsten Behandlungssoftware auf der Grundlage von Fachwissen und evidenzbasierten Untersuchungen



Breitere Anwendbarkeit


- Ständig werden neue Behandlungen hinzugefügt
- Neu im Jahr 2014: Sportindikationen
- Schnelleres Resultat durch zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten



Mehr Patienten mit schnellerem Resultat

- Mehr Patienten kommen für Stoßwellentherapie in Betracht
- Ihre Patienten befinden sich schneller wieder auf Aktivitätsniveau
- Eine Stimulanz für einen weiteren Ausbau Ihrer Praxis

Eine Investition, die sich wirklich lohnt

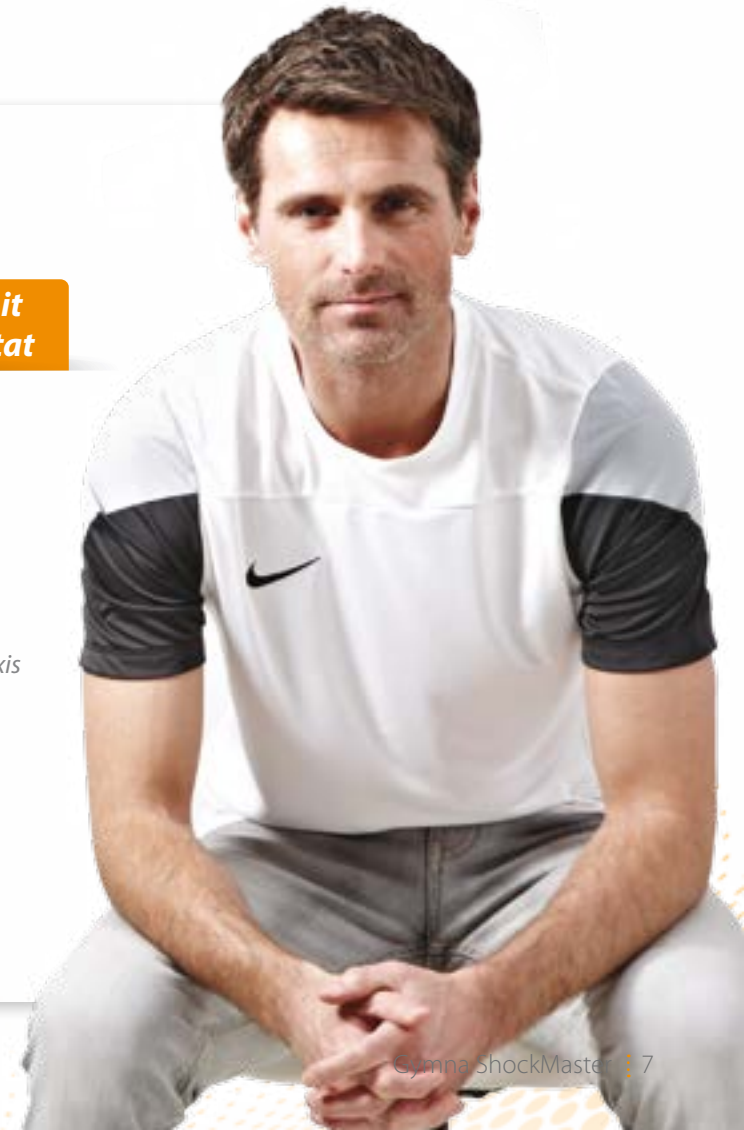

Neu

Gymna Physio Care

Hochwertige Massagelotionen für Profis



Kryotherapie

Diathermie

Stoßwellentherapie

Physio Care

Behandlungsliegen

Elektrotherapie

Aktive Motion



Ihr Händler:

gymna.com

gymna[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510 | Fax: +32 (0)89 510 511